

De onderbeenprothese zonder liner

Onderhoud en gebruik

In deze folder leest u alles over het aantrekken, onderhoud en gebruik van de onderbeenprothese zonder liner.



Aantrekken en onderhoud van uw onderbeenprothese

Goed onderhoud van uw prothesekoker en stompkousen is heel belangrijk. Hiermee voorkomt u nare geurtjes en - nog belangrijker - infecties van de stomp door schimmels of bacteriën. Onze instrumentmakers geven u bij aflevering van de prothese adviezen voor gebruik en onderhoud. In deze folder zetten we alles nog even op een rij.



De prothese om uw been

De buitenkoker van uw prothese is door onze orthopedisch instrumentmaker voor u op maat gemaakt. In deze buitenkoker draagt u een zachte binnenkoker die de schokken opvangt en ervoor zorgt dat er zo min mogelijk drukpunten ontstaan. Over uw stomp draagt u een stompkous om de huid te beschermen en transpiratievocht op te nemen. Ook maken stompsokken het aantrekken van de prothese eenvoudiger.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact met ons op via 010 241 2555.

Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

RJNDAM
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek



De prothese aantrekken

1. Trek de stompsok aan over uw stomp.
2. Daaroverheen schuift u de zachte binnenkoker.
3. Plaats over de binnenkoker het nylon kousje.
4. Vervolgens 'stapt' u in de buitenkoker.
5. Daarna trekt u het elastisch kniemanchet over uw prothese. De prothese is nu één geheel met uw been.



De prothese uittrekken

1. Trek eerst het elastisch kniemanchet naar beneden.
2. Houd daarna het nylonkousje met één hand vast en druk met uw andere hand de harde buitenkoker naar beneden. Nu zit alleen de binnenkoker nog om uw been.
3. Trek het nylonkousje van de koker af.
4. Haal de koker van uw been en trek de stompsok uit.



Onderhoud

Was de stompsok dagelijks. Het nylonkousje kunt u wassen als het vuil is. De binnenkoker maakt u dagelijks schoon met een vochtige doek.